

機械器具（68） 印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科印象採得用トレー

JMDN コード 16350000

イージー トレー


【禁忌・禁止】

再使用禁止。

本品の原料について過敏症のある患者に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

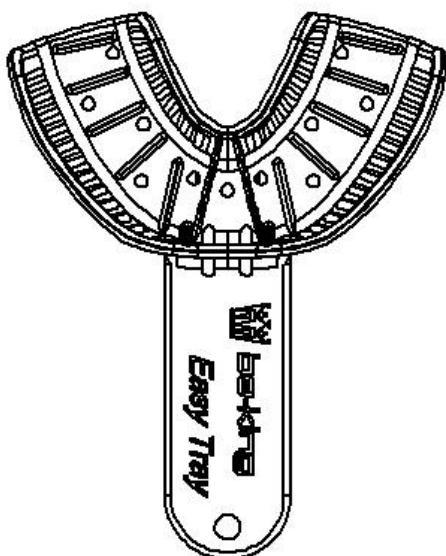

2) 原材料

ABS樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、前歯の印象を採得する際に、印象材を口腔内へ運搬、保持、圧接するために使用する器具である。

【使用方法等】

- 1) イージートレー（以下、トレー）を袋から取り出し、消毒する。
- 2) トレーに印象材を盛る。
- 3) 患者の口腔内にトレーのバイト部分を挿入する。
- 4) 患者の歯にトレーを圧接する。
- 5) 印象材が硬化するのを待つ。硬化時間は、使用する印象材による。
- 6) 硬化後、患者の口腔内から、印象材ごとトレーを取り出す。
- 7) 採得した印象の型へ石膏を流し込み、石膏が硬化するのを待つ。硬化時間は、使用する石膏による。
- 8) 硬化した石膏模型を取り外す。
- 9) 使い終えたトレーを破棄する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 本品は前歯の印象を採得することを想定して設計されたものであるため、臼歯部分まで採得をする場合は他のトレーを使用すること。
- 2) 再使用しないこと。
- 3) 患者の口腔内に挿入する前に、消毒すること。消毒液はアルコール系や塩素系のもの等を使用できる。消毒液を脱脂綿などに染み込ませてトレーを拭い、薬剤が残らないように拭き取る。
- 4) 湿熱による滅菌・消毒は行わないこと。損傷するおそれがある。
- 5) 使用者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、破折などがない事を確認すること。破折や傷があるものを使用すると、口腔内を負傷するおそれがある。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

本品は、品質保持のため、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ピカッシュ

住 所：熊本県菊池郡菊陽町大字原水 2849-1

電話番号：096-342-1081

製 造 国：中華人民共和国